

MEDAZYM®

Τρι-ενζυματικό καθαριστικό ιατρικών και χειρουργικών εργαλείων

Το MEDAZYM είναι ένα πολύ δραστικό συμπυκνωμένο καθαριστικό με ουδέτερο pH.

Περιέχει συνδυασμό τριών ενζύμων (πρωτεάση, λιπάση, αμυλάση) που διασπούν πρωτεΐνες, λίπη, καθώς και κατάλοιπα αίματος.

Αφαιρεί αποτελεσματικά τα οργανικά κατάλοιπα ενώ αποτρέπει την διάβρωση και τον αποχρωματισμό των εργαλείων. Αφαιρεί αποτελεσματικά ακόμα και τις πιο σκληρές εναποθέσεις.

Είναι κατάλληλο για καθαρισμό με χρήση λουτρού υπερήχων, με εμβάπτιση, ή με συμβατικό πλύσιμο χειρός.

Χρησιμοποιείται σε όλα τα είδη εργαλείων.

Ιδιότητες

- Συνδυασμός τριών ενζύμων για τριπλή αντιρρυπαντική δράση
- Αφαιρεί δραστικά τα οργανικά κατάλοιπα
- Πολύ οικονομικό: 0.5 - 1% αραιώση
- Κατάλληλο για καθαρισμό με χρήση λουτρού υπερήχων, με εμβάπτιση, η με συμβατικό πλύσιμο
- Δεν αφρίζει, δεν διαβρώνει, δεν αποχρωματίζει τα εργαλεία
- Εφαρμόζεται τόσο σε θερμοανθεκτικά όσο και σε θερμοευαίσθητα εργαλεία

Οδηγίες χρήσης

Αραιώστε 20 ml του MEDAZYM σε 2 λίτρα κρύο νερό (αραιώση 1%). Ανοίξτε όλα τα εργαλεία με αρθρώσεις.

Εμβυθίστε τα στο διάλυμα ούτως ώστε να είναι πλήρως καλυμμένα και αφήστε τα για τουλάχιστον 5 λεπτά.

Ξεπλύνετε τα εργαλεία με τρεχούμενο νερό. Στεγνώστε τα καλά με ένα καθαρό πανί. Τα εργαλεία σας είναι έτοιμα για αποστείρωση.

Αλλάζετε το διάλυμα κάθε 48 ώρες, ή όταν έχει λερωθεί πολύ.

Μην αναμειγνύετε με άλλα απολυμαντικά προϊόντα.

Η συσκευασία πρέπει να κλείνεται ερμητικά μετά τη χρήση.

Αποθηκεύστε το προϊόν μεταξύ +5°C και +35°C.



Συσκευασίες

- Φιάλη ενός λίτρου με δοσομετρητή (Κωδ. 20019)

Φυσικές Ιδιότητες

- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| ■ Εμφάνιση: | Διαφάνες κίτρινο διάλυμα |
| ■ Πυκνότητα: | 1.02 g/cm ³ στους 20°C |
| ■ pH: | 7.0 - 8.0 Ουδέτερο στους 20°C |
| ■ pH (0.5% - 1%): | 7.0 - Ουδέτερο στους 20°C |
| ■ Οσμή: | Ουδέτερη |
| ■ Διατήρηση: | 5°C - 35°C |
| ■ Σταθερότητα: | 3 Έτη |
| ■ Βιοδιασπασιμότητα: | Σύμφωνα με την OCDE 301D |

Πιστοποιήσεις

- Σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (οδηγία 93/42/ΕΕC).
- Ιατροτεχνολογικό προϊόν κλάσης I

MEDAZYM[®]

Τρι-ενζυματικό καθαριστικό
ιατρικών και χειρουργικών εργαλείων



Το MEDAZYM παρασκευάζεται στην Ελλάδα.

Η **MEDALKAN** τηρεί τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2012 και ISO 13485:2016 που αφορούν τον σχεδιασμό και την παραγωγή ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Λουτρά υπερήχων

Το MEDAZYM μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους κοινούς τύπους λουτρών υπερήχων.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αραιώση 0.5% και θερμοκρασία έως 55°C.

Συμβατότητα

Το MEDAZYM είναι συμβατό με τα περισσότερα υλικά όπως ανοξείδωτο ατσάλι, αλουμίνιο, γυαλί, κεραμικά, σκληρά πλαστικά, εβονίτης, κλπ...

Συστατικά

Πρωτεάση, λιπάση, αμυλάση, μη ιονικά τασιενεργά <5%, αναστολέας διάβρωσης, ρυθμιστής pH, έκδοχα.